

PICO PRO 4W

Pico second
ND:yag Laser Skin care system



Qu'est-ce qu'un laser Pico-second

Le laser Pico second est la dernière technologie de nouvelle génération à usage esthétique. Des résultats spectaculaires sont atteints grâce à une impulsion au trilliardième de seconde et une énergie puissante. Ce traitement permet de broyer les pigments du tatouage dans le tissu de la peau et d'obtenir une élimination complète de celui-ci sur tous types de peau.

Grâce à des lentilles fractionnées spécifiques, le laser Pico Second peut transformer l'énergie laser en une pression douce afin de créer un nouveau collagène par principe de pression de la cellule et activation de la cellule naturelle. Sans brûlure ni effet secondaire sur le peau.



Avantages du laser Pico second

Haute énergie & durée de pulsation courte:

La puissance émise en trillions de seconde sur le tissu de la peau permet d'exploser le pigment d'encre en une multitude de très petites particules, beaucoup plus fines que lors d'une séance Q-switch traditionnelle. Les particules seront ainsi absorbées plus facilement et plus rapidement par l'organisme.

Risque minimisé et presque indolore

Etant donné que la durée d'impulsion a été réduite par mille, on réalise moins de dégâts cutané. Le traitement est plus sûr et moins douloureux.

Pas d'anesthésie durant le traitement, pas d'inflammation.

Rapidité:



Pour un détatouage traditionnel, le traitement requiert entre 6 à 10 séances avec Q-switch. Avec le Pico second, la durée du traitement est divisé par 2 (en moyenne)

Hautes performances

La technologie Pico second permet un traitement complet quelle que soit la couleur, contrairement aux méthodes traditionnelles

Convient pour les types de peau de I-IV, pas d'hypopigmentation après le traitement.

Comparatif de performance Picosecond VS Q-Switch

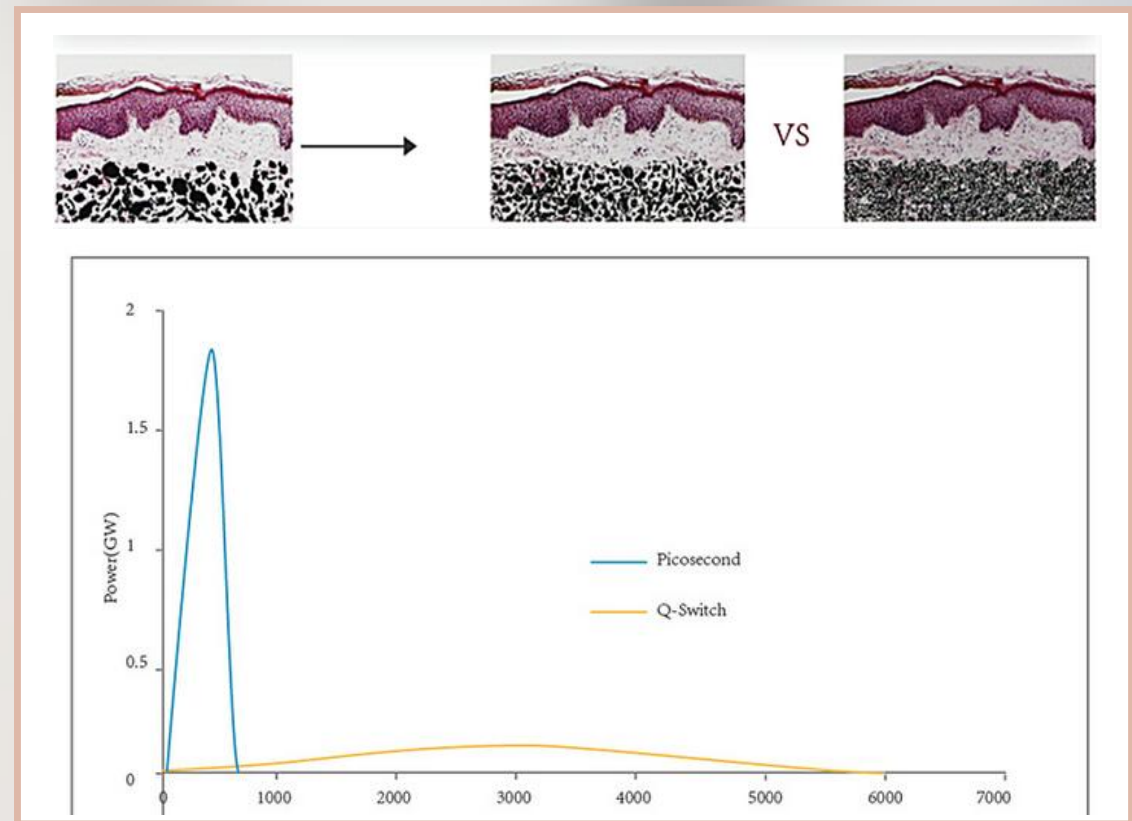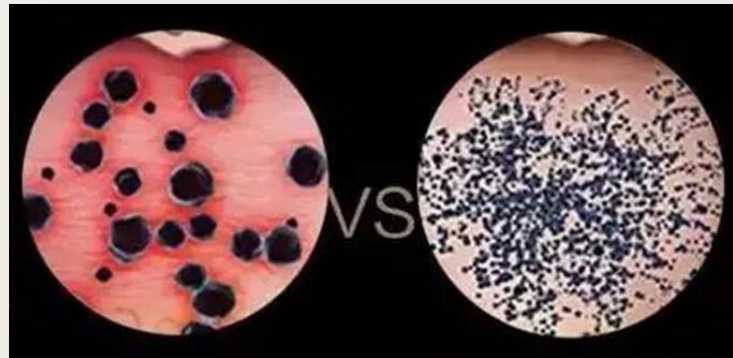

Gamme de traitement:

01

Tatouage du corps, des sourcils et contour des lèvres .

02

Pigment de l'épiderme et de la couche du derme

03

Nevus d'Ota et taches de naissance.

04

Tâches de rousseur, taches noires, tâches de vieillesse, de café et solaires.

05

Rafrâichissement de la peau, blanchiment de la peau et resurfacing.

06

Elimination des cicatrices d'acné et des varicosités

Specification Techniques

Laser Type: Pico second ND: YAG Laser

Niveau d'énergie:	Max 400mj or 800mj in double mode (532nm), Max 800mj or 1600mj in double mode(1064nm)
Longueur d'ondes:	1064nm, 532nm (650nm and 585nm Optionel)
Durée de pulsation:	700ps
Fréquence de répétition:	1-8Hz
Taille du spot:	2-10MM
Dimension:	90 X 45 X 170cm
Poids:	113kg

Q & R

Combien de traitement sont nécessaire?

Le nombre de séances nécessaire sera influé par une multitudes de paramètres (type de couleurs, qualité de l'encre, profondeur du tatouage, la taille du tatouage, sa localisation et sa densité. Généralement nous assistons à une disparition complètes en 3 à 4 séances.



Combien de temps dure le résultat?

Le détatouage et le traitement des cicatrices d'acné sont définitifs. Les résultats du rajeunissement de la peau sont durables et certaines conditions pigmentaires peuvent être récupérées

Est-ce qu'il y aura des cicatrices?

Le Pico second a été conçu pour assurer un maximum de sécurité, les cicatrices sont très rares et temporaires, les traitements de détatouage nécessitent une énergie plus élevée et certains patients peuvent subir une hypopigmentation temporaire.



Quel est le temps d'intervalle entre chaque séances?

Le temps d'intervalle entre chaque séance dépend de la zone traitée et de la capacité de cicatrisation de chaque patient. Pour le détatouage il est généralement de 6 à 8 semaines et pour les lésions cutanées à l'aide de la lentille fractionnée, il est de l'ordre de 3 à 4 semaines.

Le Pico second est-il dangereux?

Les impulsions ultra-courtes du Pico second permettent de minimiser la quantité de chaleur qui est transférée. Moins de chaleur signifie moins de dommages cutanée environnant et moins de risques de lésions. Correctement utilisé, il est inoffensif.



Dois-je éviter le soleil après le traitement?

Oui dans tous les cas, après un traitement laser, il est recommandé d'éviter une exposition solaire ainsi que le solarium et d'utiliser un écran solaire de SPF50 +.

Combien de temps dure la procédure?

Celui-ci dépendra de la taille de la zone à traiter, mais généralement la séance durera environ 20 minutes. Evitez de travailler de trop grandes zones en une seule fois afin de mieux gérer la cicatrisation par le patient.



Quels sont les tarifs moyen des soins?

Généralement le tarif se calcul en fonction de la surface traitée :

5 cm² : 60 €

10 cm² : 80 €

11-30 cm² : 140 €

31-50 cm² : 170 €


51-100 cm² : 200 €

Surface plus grande sur devis

Il est à noter que le prix varie également suivant le nombre de couleur présente dans le tatouage



Liste des accessoires

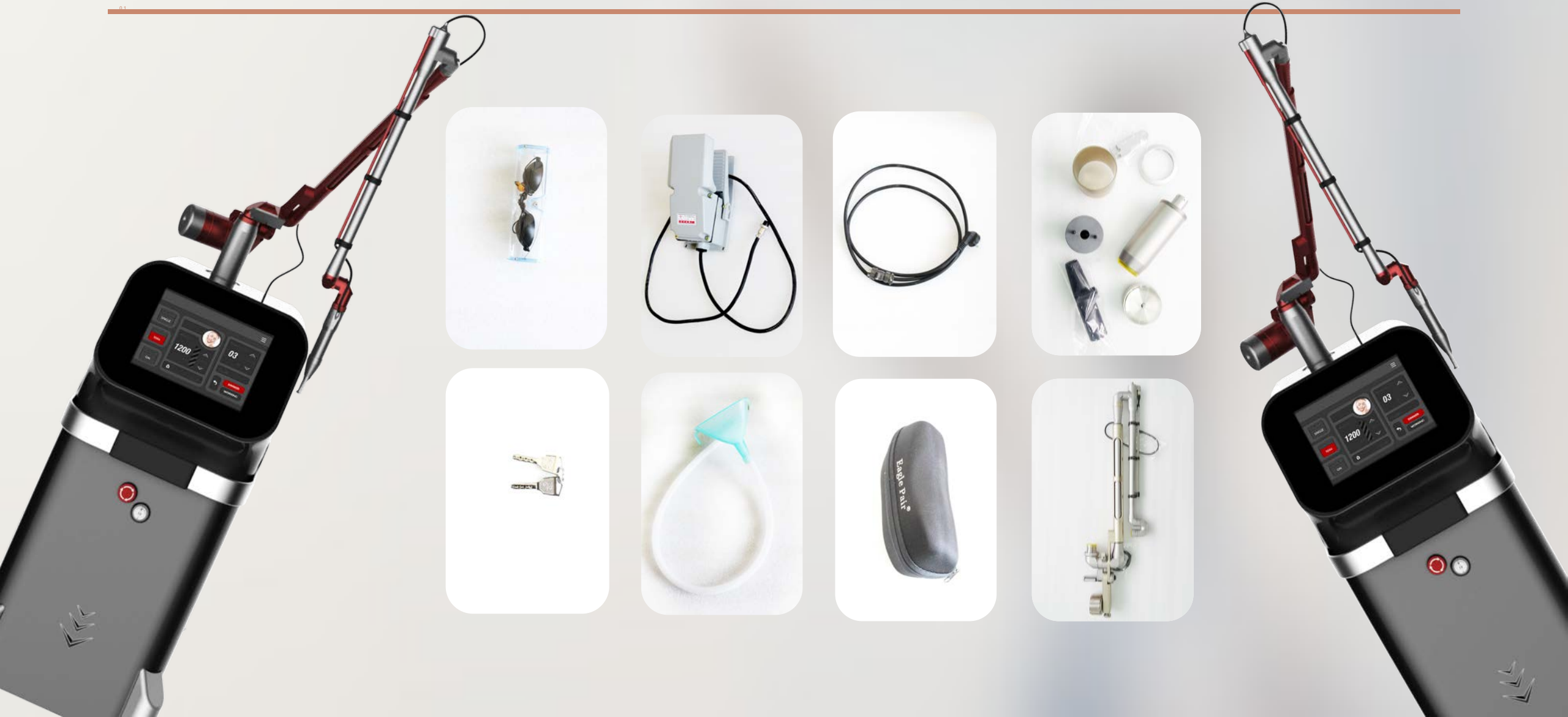

OPTIONNEL



585nm



650nm




Fractionné

La pièce à main 585 nm sera conseillé pour traiter les tâches de naissance, de café, le nevus d'Ota, les tatouages de couleur rouge et bleu, les lésions vasculaires


Le modèle 650 sera conseillé pour traiter les tatouages de couleur verte et jaune

La tête fractionné est conseillée pour le resurfacing

Interface conviviale





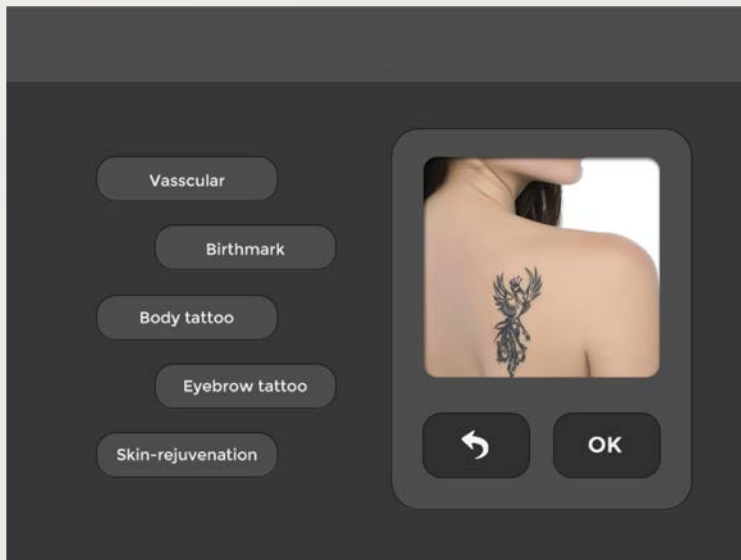


Menu utilisateur

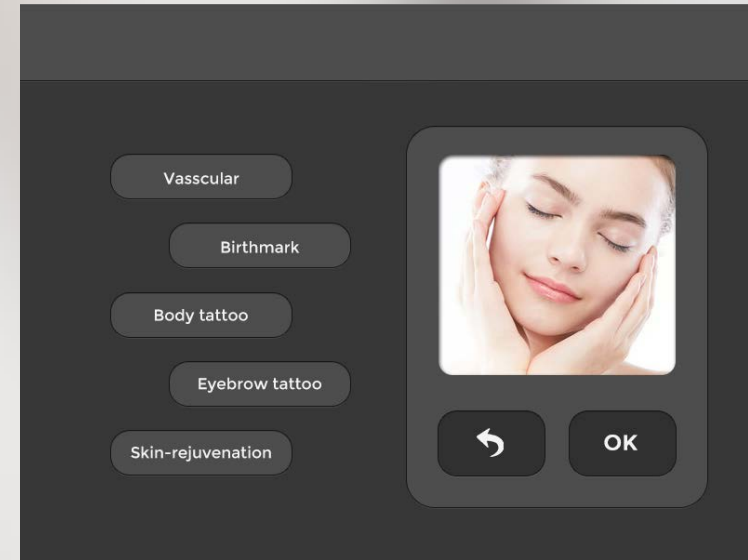

Paramètre d'ajustement

Avant & Après

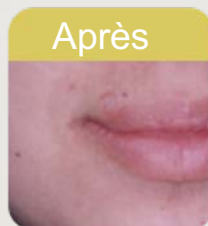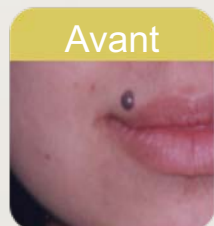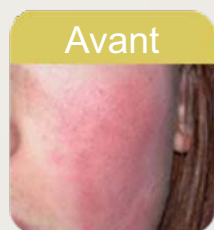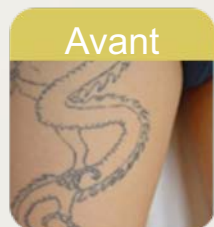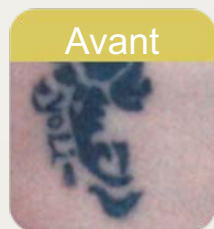

Merci

Nous vous invitons à consulter plus!

Adresse: 48 rue principale, 8365 Hagen - Luxembourg

Tel: 352- 661 21 77 77

Email: a.theismann@luxlaser.org

www.luxlaser.org

LUXLASER

LASER POUR ESTHÉTIQUE ET DERMATOLOGIE

