







sales@btlnet.com exilis.com

Dans l'UE : le EXILIS ULTRA 360™ est destiné au traitement de l'obésité par réduction contrôlée des cellules adipeuses, sous l'action combinée d'un champ de radiofréquence et d'ultrasons. Traitement de la dysfonction sexuelle après accouchement par voie basse par l'amélioration du relâchement vaginal. ©2019 Groupe de sociétés BTL. Tous droits réservés. Les produits, leurs méthodes de fabrication ou leur utilisation peuvent faire l'objet d'un ou plusieurs brevets ou demandes de brevets aux États-Unis ou à l'étranger.

Cette brochure n'est pas destinée aux clients des États-Unis. BTL® et Exilis® sont des marques de commerce déposées aux États-Unis, dans l'Union européenne et/ou dans d'autres pays.



Pour le traitement de:

DIFFÉRENTES INDICATIONS telles que les rides, le relâchement de la peau et les amas graisseux.

PLUSIEURS ZONES dont le visage, le corps et les parties intimes de la femme.

TOUS LES CORPS sans exception, quel que soit l'IMC ou le type de peau.

TRAITE TOUS LES CORPS







- ✓ Tous les types de peau
- ✓ Tous les IMC sans limites
- ✓ Hommes et femmes de tous les âges*

*Patients adultes

DE LA TÊTE AUX PIEDS



Visage



Rides & relâchement de la peau

Corps




Réduction des amas graisseux & raffermissement de la peau

Parties intimes



Relâchement vaginal

VISAGE: RÉDUCTION DES RIDES

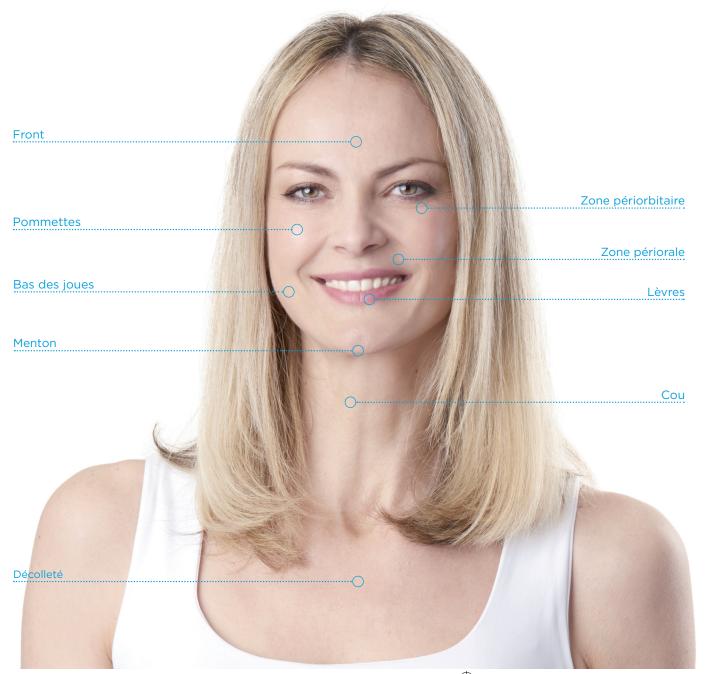

42%

Réduction des rides¹

2.9_x

Augmentation du collagène²

19%

Augmentation de la densité de la peau¹




AMÉLIORATION DU RELÂCHEMENT DE LA PEAU

Grâce au procédé Volumetric Heating à 360°, des résultats sur le rajeunissement de la peau et la réduction des rides sont obtenus lors d'un traitement de courte durée.

L'énergie thermique appliquée de façon ciblée attaque les fibres du collagène. La structure en triple hélice du collagène est modifiée par la chaleur et le processus de transformation est mis en route.

Le processus naturel de guérison permet aux fibroblastes de produire de nouvelles fibres de collagène.

- L'embout de l'applicateur à 360° spécialement conçu facilite le traitement de zones difficiles d'accès, comme la zone périorbitaire.
- Une grande surface de contact permet d'obtenir des résultats encore plus homogènes.

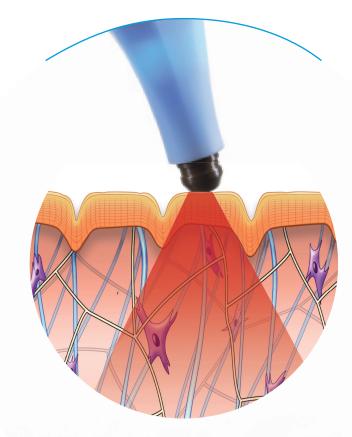


Radiofréquence + Ultrasons



CORPS: RÉDUCTION DES GRAISSES

Un raffermissement de la peau et une réduction des amas graisseux peuvent être obtenus sur différentes zones du corps sans limites d'IMC ou de type de peau.

- Grâce à l'application contrôlée de la chaleur et du refroidissement, l'énergie pénètre dans les différentes couches de la peau.
- Le changement de température pendant le traitement permet de traiter toutes les couches de la peau, des plus profondes aux plus superficielles.
- Le contrôle de la température en temps réel permet une application plus précise de la chaleur sur la peau.
- La conception de l'applicateur permet à l'utilisateur de vérifier la température et d'ajuster les paramètres de traitement.

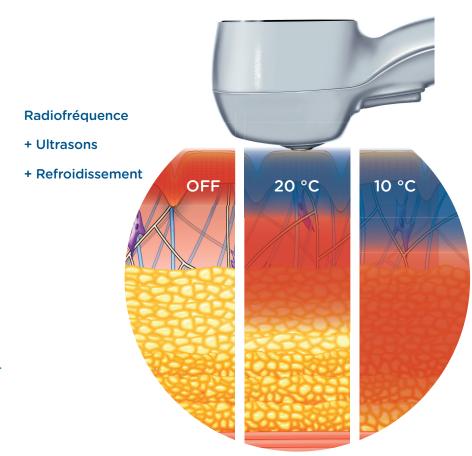

RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU

35%


Réduction du relâchement de la peau¹

6.4x


Augmentation de l'indice apoptotique³

92%

Taux de reconnaissance sur différentes zones du corps⁴

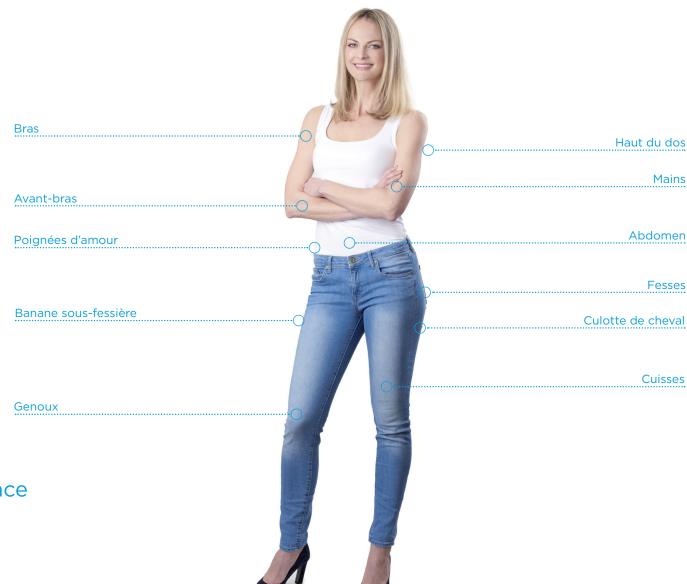

PARTIES INTIMES DE LA FEMME

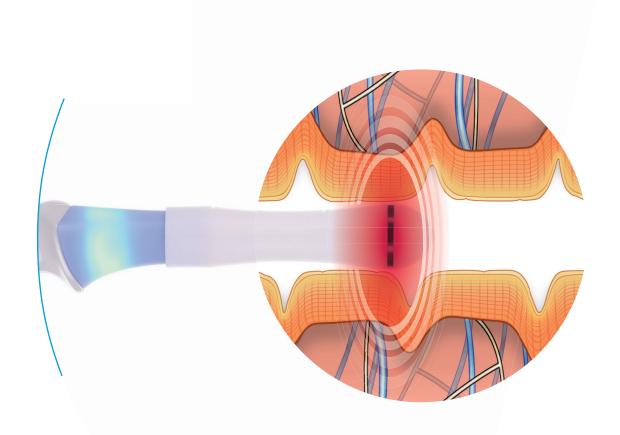

96%

Amélioration de la tonicité vaginale⁷

93%

Amélioration de la satisfaction sexuelle⁷

37%

Augmentation de la teneur en élastine⁸

La procédure consiste en un mouvement doux de va et vient assurant un niveau de confort maximal. Il n'est donc pas nécessaire de procéder de côté, ce qui forcerait le praticien à tourner l'applicateur pour l'introduire dans le vagin.

AMÉLIORATION DU RELÂCHEMENT

Grâce aux embouts de l'applicateur à 360°, c'est le traitement RF le plus rapide disponible actuellement.

- Procédé Volumetric Heating à 360° pour un traitement plus rapide, plus sûr et plus confortable des parties génitales de la femme.
- Différentes tailles d'embouts interchangeables pour l'applicateur pour le traitement interne et externe des organes génitaux.
- Système révolutionnaire de contrôle de l'énergie
 Energy Flow Control (EFC) avec contrôle de l'impédance intégré (Impedance Intelligence) pour une application uniforme de la chaleur sur la zone ciblée.



Le traitement de la vulve avec EXILIS ULTRA 360 inclut le traitement des grandes lèvres, du périnée, du mont de Vénus et du vestibule vulvaire.

EXILIS ULTRA 360™

07/07/2021 17:05:25







DE LA TÊTE AUX PIEDS



APRÈS EXILIS ULTRA 360



APRÈS LE 4E TRAITEMENT, INFORMATIONS TRANSMISES PAR : JAYE BIRD AESTHETICS CLINIC

AVANT



APRÈS EXILIS ULTRA 360



APRÈS LE 4E TRAITEMENT, INFORMATIONS TRANSMISES PAR : BTL AESTHETICS

AVANT



INFORMATIONS TRANSMISES PAR : JAYE BIRD AESTHETICS CLINIC







APRÈS LE 5E TRAITEMENT

AVANT

APRÈS EXILIS ULTRA 360

APRÈS LE 4E TRAITEMENT, INFORMATIONS TRANSMISES PAR : BTL AESTHETICS







APRÈS LE 4E TRAITEMENT, INFORMATIONS TRANSMISES PAR : BTL AESTHETICS



VISAGE & CORPS

EFFICACITÉ PROUVÉE DU PROTOCOLE ACCÉLÉRÉ DE LIAISON DOUBLE : BIOPSIE, ULTRASONS, OBSERVATIONS CLINIQUES

PROTOCOLE DE DOUBLE TRAITEMENT DU RELÂCHEMENT DE LA PEAU AVEC UN APPAREIL DE RADIOFRÉQUENCE MONOPOLAIRE DYNAMIQUE DE 90 WATTS AVEC CONTRÔLE DE L'IMPÉDANCE EN TEMPS RÉEL

David McDaniel M.D., Robert Weiss M.D., Margaret Weiss M.D., Chris Mazur BS, and Charrnaine Griffin CCR P1


1. McDaniel Institute of Anti-Aging Research, Virginia Beach, VA; 2. Maryland Laser Skin & Vein Institute, Hunt Valley, MD


RÉSUMÉ

- Traitement de 24 femmes contre le relâchement de la peau du visage.
- 2 traitements effectués sur une durée deux fois plus longue, au lieu de 4 traitements standard.
- Résultats: 35 % de réduction du relâchement de la peau, 42 % de réduction des rides et 33 % de réduction dans l'apparence générale d'un photodommage.
- L'analyse histologique des échantillons prélevés démontre une augmentation significative du collagène épidermique et des fibres d'élastine.
- 19 % d'augmentation de la densité de la peau démontrée grâce à des mesures par ultrasons.

Après traitement



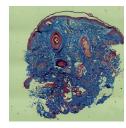

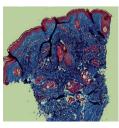

La coloration de Masson sur un des sujets démontre la présence accrue de collagène (bleu) 3 mois après la fin du traitement.

ÉTUDE HISTOLOGIQUE : AUGMENTATION DE LA TENEUR EN COLLAGÈNE DE L'ÉPIDERME

EFFICACITÉ DE LA RADIOFRÉQUENCE MONOPOLAIRE DANS LE REMODELAGE DU COLLAGÈNE ÉPIDERMIQUE : UNE ÉTUDE VÉTÉRINAIRE.


Klaus Fritz¹, Jan Bernardy², George Sonn Tiplica³ & Alena Machovcova⁴


 Dermatology and Laser Center, Landau, Germany, Universität Osnabrück, Kosmetologie und Gesundheitswissenschaften Department (Leiter Prof. Dr. John), Osnabrück, Germany;
 Veterinary Research Institute, Brno, Czech Republic;
 Dermatology Department, University Carol Davila, Bucharest, Romania;
 Dermatology and Venereology, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic

RÉSUMÉ

- Échantillons prélevés avant le traitement et après 3 mois.
- Analyse stéréologique à l'aide de la méthode trichomique.
- Augmentation de la teneur en collagène dans les tissus traités de 9,03 % à 25,89 % en moyenne.
- L'étude démontre une néocollagenèse significative et un remodelage du collagène provoqués directement par le traitement.

Résultats de l'analyse stéréologique

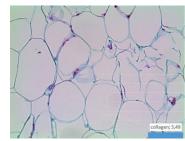

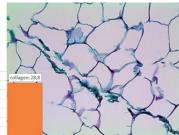

3,49 %, avant traitement

28,8 %, après la fin du traitement



MCDANIEL, David, et al. Two-treatment protocol for skin laxity using 90-Watt dynamic monopolar radiofrequency device with real-time impedance intelligence monitoring. Journal of drugs in dermatology: JDD, 2014, 13.9: 1112-1117.

^{2.} FRITZ, Klaus, et al. Efficacy of monopolar radiofrequency on skin collagen remodeling: a veterinary study. Dermatologic therapy, 2015, 28.3: 122-125.



VISAGE & CORPS

UTILISATION THÉRAPEUTIQUE DE LA CHALEUR DANS LE DERME PROFOND : UN REFROIDISSEMENT RÉGULÉ PERMET UN ÉCHAUFFEMENT EFFICACE DE LA COUCHE ADIPEUSE


APOPTOSE PROVOQUÉE PAR UNE RADIOFRÉQUENCE MONOPOLAIRE CIBLÉE: ÉTUDE PORCINE

David McDaniel M.D., 1 Klaus Fritz, M.D., 2,3 Alena Machovcova MD PhD MBA,4,5 and Jan Bernardy PhD6

1. McDaniel Institute of Anti-Aging Research, Virginia Beach, VA; 2. Dermatology and Laser Centers Landau, Germany 3. University of Osnabrück - Department of Health Sciences; 4. University Hospital Motol, Department of Dermatology and Venereology, Prague, Czech Republic; 5. Department of Occupational Medicine, 1st Faculty of Medicine at Charles University, Prague, Czech Republic; 6. Veterinary Research Institute, Brno, Czech Republic

RÉSUMÉ

- Une étude vétérinaire unique sur l'apoptose portant sur des porcs vietnamiens prouvant l'élimination définitive des cellules adipeuses.
- Les mesures de températures ont prouvé que la température des couches adipeuses augmente à 42-46 °C pendant le traitement tout en maintenant la température de la peau à un niveau sûr.
- L'analyse histologique des échantillons avec la méthode TUNEL a démontré une augmentation de l'indice apoptotique de 7 % en moyenne (avant le premier traitement) à 53,4 %, 39,6 %, 40,2 % et 44,7 % en moyenne après chacun des 4 traitements.
- L'examen histopathologique a démontré l'absence totale de risque.

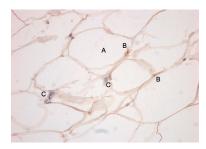

Le noyau cellulaire apoptotique de l'adipocyte (A) est coloré en marron (B), les autres noyaux sont bleus (C) (400 x).

CONFIRMATION DE L'EFFICACITÉ **CLINIQUE SUR PLUSIEURS ZONES DU CORPS**

TRAITEMENT DE PLUSIEURS ZONES DU CORPS CONTRE LE RELÂCHEMENT DE LA PEAU ET LES AMAS GRAISSEUX À L'AIDE D'UN NOUVEL APPAREIL DE RADIOFRÉQUENCE CIBLÉE AVEC ULTRASONS : ÉTUDE DE SÉCURITÉ ET D'EFFICACITÉ

Suneel Chilukuri M.D.¹, Dominique Denjean M.D.², Linda Fouque M.D.³

1. Refresh Dermatology, Houston, TX, USA; 2. Cabinet de Dermatologie Esthetique, Paris, France; 3. Dermatologue Esthetique, Nice, France

RÉSUMÉ

- Étude unique portant sur différentes zones du corps démontrant d'excellents résultats de la tête aux pieds.
- 34 patients traités sur le visage, les bras, l'abdomen et les cuisses à l'aide des nouveaux embouts de l'applicateur.
- 90 % des patients ont réagi
- Grande satisfaction de tous les patients impliqués.
- L'étude conclue à une très grande efficacité due à la combinaison de RF. d'US et de l'émission à 360°.




Après 3 mois





Avant le traitement

Après 3 mois

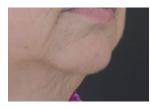



4. CHILUKURI, Suneel; DENJEAN, Dominique; FOUQUE, Linda. Treating multiple body parts for skin laxity and fat deposits using a novel focused radiofrequency device with an ultrasound component: Safety and efficacy study. Journal of cosmetic dermatology, 2017, 16.4: 476-479.



^{3.} DAVID MCDANIEL, M. D.; FRITZ, Klaus. A focused monopolar radiofrequency causes apoptosis: a porcine model. Journal of Drugs in Dermatology, 2014, 13.11: 1336-1340.



VISAGE & CORPS

COMPARAISON D'APPAREILS NON INVASIFS DE RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU

APPAREILS NON INVASIFS DE RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU PAR LA CHALEUR: ÉTUDE D'EFFICACITÉ ET DE SATISFACTION DES PATIENTS.

Suneel Chilukuri MD FAAD FASDS¹ and Jason Lupton MD²

1. Refresh Dermatology, Houston,TX; 2. San Diego Dermatology & Laser Surgery, San Diego,CA

RÉSUMÉ

L'analyse comparative de toutes les études existantes sur 3 des principaux appareils de raffermissement de la peau montre que :

- EXILIS ULTRA 360 est plus efficace
- Un plus grand nombre de patients réagissent à EXILIS ULTRA 360
- EXILIS ULTRA 360 est moins douloureux
- Une plus grande satisfaction des patients est atteinte avec EXILIS ULTRA 360

	Efficacité clinique	Satisfaction des patients
EXILIS ULTRA 360	89-93%	77-95%
ThermaCool	47-95%	53-78%
Ultherapy	58.1-96%	65.6-95%

	Patients sans réaction	Effets indésirables graves
EXILIS ULTRA 360	3-8%	None
ThermaCool	5-14%	Rare
Ultherapy	14-20%	Rare

	Durée du traitement (tout le visage)	Anesthésiant
EXILIS ULTRA 360	40-45min	NO
ThermaCool	60-120min	YES
Ultherapy	60-85min	YES

CHILUKURI, Suneel; LUPTON, Jason. "Deep Heating" Noninvasive Skin Tightening Devices: Review of Effectiveness and Patient Satisfaction. Journal of drugs in dermatology: JDD, 2017, 16.12: 1262-1266.

DÉMONSTRATION DE L'AMÉLIORATION DU RELÂCHEMENT DE LA PEAU, DE LA RÉDUCTION DU TOUR DE BRAS, ET DE LA RÉDUCTION DES COUSSINS ADIPEUX SOUS MANDIBULAIRES

RADIOFRÉQUENCE MONOPOLAIRE DYNAMIQUE POUR UN TRAITEMENT NON INVASIF RÉUSSI DU RELÂCHEMENT DE LA PEAU ET DE LA FORME DU CORPS

R. A. Weiss, MD, FAAD, M. A. Weiss, MD, FAAD

Livre blanc

RÉSUMÉ

- **30 patients** (28 femmes et 2 hommes) traités contre le relâchement de la peau du visage et du cou et pour une réduction des graisses dans le bras.
- 4 traitements à 7 à 10 jours d'intervalle.
- 93,3 % des sujets ont constaté une diminution significative du relâchement de la peau du visage.
- La réduction moyenne du tour de bras a été de 2,1cm.
- Il a été prouvé que l'appareil est efficace quelle que soit la zone du corps traitée, tout en étant totalement sûr (aucun effet indésirable n'a été signalé) et en garantissant le confort du patient.







Après

Réduction des coussins adipeux sous mandibulaires.

^{6.} WEISS, Robert A. Noninvasive radio frequency for skin tightening and body contouring. Semin Cutan Med Surg, 2013, 32.1: 9-17



TONIFICATION VAGINALE & SATISFACTION SEXUELLE

CHAUFFEMENT VOLUMÉTRIQUE PAR RADIOFRÉQUENCE POUR LE TRAITEMENT DU RELÂCHEMENT VAGINAL ET SES EFFETS SUR LA SATISFACTION SEXUELLE

Evans, K.L.

Obstetrics, Gynecology and Wellness, Houston, TX

RÉSUMÉ

- 51 patientes concernées.
- Toutes les patientes ont suivi 3 traitements avec EXILIS ULTRA 360.
- Application intravaginale et extravaginale.
- 93 % des patientes ont constaté une amélioration de leur satisfaction sexuelle.
- Plus de 55 % des patientes ont rapporté une absence complète d'effets indésirables 90 jours après le traitement.
- Le questionnaire sur le relâchement vaginal a démontré une amélioration de la tonicité vaginale pour 96 % des patientes.
- Amélioration significative de la satisfaction sexuelle.
- Lors de la séance de suivi, toutes les patientes ont déclaré ne plus du tout ressentir de relâchement vaginal.
- Un niveau d'inconfort a été signalé dans 0,03 % des traitements, le niveau moyen d'inconfort selon l'échelle SVA atteignant zéro.

$7.\, {\sf EVANS}, {\sf K.\,L.\,009\,Radio\,Frequency\,Volumetric\,Heating\,for\,Vaginal\,Laxity\,Treatment\,and\,Effects\,on\,Sexual}$ Satisfaction. The Journal of Sexual Medicine, 2018, 15.6: S102.

ÉTUDE IN VIVO HISTOLOGIQUE : AMÉLIORATIONS QUANTITATIVES DU TISSU VAGINAL


SÉCURITÉ ET MÉCANISME D'ACTION DU TRAITEMENT NON INVASIF PAR RADIOFRÉQUENCE DU RELÂCHEMENT VAGINAL : ÉTUDE HISTOLOGIQUE **CHEZ LE COCHON**


David E. Kent MD¹, Jan Bernardy MVD²

1. Dermatologic Surgery Specialists, Macon, Georgia; 2. Veterinary Research Institute Brno, Czech Republic

RÉSUMÉ

- EXILIS ULTRA 360 une fois par semaine pendant trois semaines.
- Des échantillons ont été prélevés et des mesures échographiques ont été prises après chacun des traitements et la séance de suivi.
- Les résultats ont montré une augmentation visible des fibres d'élastine (36,8 %) et de collagène (17.1%).

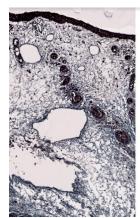

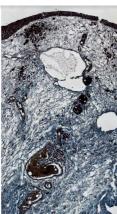

Un exemple de comparaison du volume d'élastine après le premier traitement (à gauche) et après un mois (à droite). Une augmentation de 36,5 % de la teneur en élastine (de 14,6 à 51,1 %) a pu être observée.





^{8.} KENT, David E. Safety and mechanism of action of non-invasive radiofrequency treatment for vaginal laxity: histological study in the swine vaginal model. 2018 ASLMS



VULVE & VAGIN

LA RF MONOPOLAIRE : UN TRAITEMENT EFFICACE ET SÛR DE LA IUE ET DU RELÂCHEMENT VULVO-VAGINAL

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ET DE L'EFFICACITÉ D'UN APPAREIL NON-ABLATIF DE RADIOFRÉQUENCE MONOPOLAIRE DANS LE TRAITEMENT DU RELÂCHEMENT VULVO-VAGINAL ET DE L'INCONTINENCE URINAIRE


Shelena Lalji M.D.¹, Paula Lozanova M.D.²

Dr. Shel Wellness & Medical Spa, Houston,TX, USA
 Department of Dermatology and venerology, Medical University, Sofia, Bulgaria

RÉSUMÉ

- 27 femmes présentant des symptômes légers/modérés d'incontinence urinaire à l'effort (IUE) et de relâchement vulvo vaginal.
- Trois séances à raison d'une par semaine.
- Traitement intravaginal suivi d'un traitement des grandes lèvres et du périnée.
- 26 sujets ont constaté une diminution de la fréquence de l'incontinence.
- 15 femmes ne présentaient plus aucun problème d'incontinence lors de la séance de suivi un mois après le traitement.
- Tous les sujets ont constaté une amélioration du relâchement vaginal.
- Taux de satisfaction élevé dans l'évaluation de l'amélioration de la satisfaction sexuelle.

Ma satisfaction sexuelle s'est améliorée

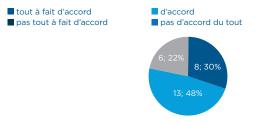

Amélioration de la satisfaction sexuelle (post-traitement)

AMÉLIORATION DE L'APPARENCE DES PARTIES GÉNITALES DE LA FEMME

RAJEUNISSEMENT DU TISSU DES LÈVRES ET AMÉLIORATION DES FONCTIONS SEXUELLES AU MOYEN D'UN NOUVEL APPAREIL NON INVASIF DE RF MONOPOLAIRE CIBLÉE

Zeljka Clark, M.D.

Rahima Moosa Mother and Child Hospital, O&G, Johannesburg, South Africa

RÉSUMÉ

- 19 femmes traitées avec ULTRA FEMME 360.
- La satisfaction sexuelle mesurée selon l'indice FSFI a augmenté de 63 % à 90 % après un mois, et s'est maintenue à 83 % un an après le traitement.
- Toutes les patientes ont réagi au traitement.
- 18 des 19 patientes ont constaté une amélioration moyenne ou excellente de l'apparence de leurs parties génitales.

Changements des fonctions sexuelles

Domaine FSFI	Avant traitement	1 mois après traitement
Désir	3.15 ± 0.90	4.68 ± 0.93
Excitation	3.43 ± 1.23	5.33 ± 0.43
Lubrification	3.25 ± 1.23	5.47 ± 0.68
Orgasme	3.41 ± 0.95	5.49 ± 0.47
Satisfaction	3.55 ± 0.95	5.52 ± 0.70
Douleur	5.80 ± 0.75	5.89 ± 0.23
TOTAL	22.59 ± 4.00	32.38 ± 1.68

Données indiquées + écart type

un peu d'accord

nas d'accord

LALJI, Shelena; LOZANOVA, Paula. Evaluation of the safety and efficacy of a monopolar nonablative radiofrequency device for the improvement of vulvo-vaginal laxity and urinary incontinence. Journal of cosmetic dermatology, 2017, 16.2: 230-234.

^{10.} CLARK, Zeljka. Labial tissue rejuvenation and sexual function improvement using a novel noninvasive focused monopolar radio frequency device. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 2018, 20.2: 66-70.



REPOSE SUR DES RECHERCHES APPROFONDIES

Images thermographiques post-traitement du visage et de l'abdomen.

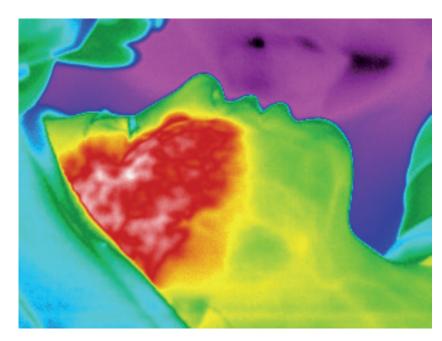


Image thermographique post-traitement de la zone périorbitaire et des joues.

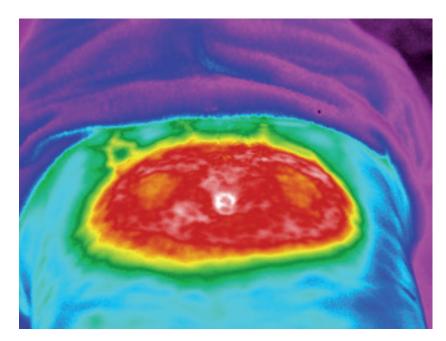


Image thermographique post-traitement de l'abdomen.



POURQUOI LES PRATICIENS APPROUVENT

DE LA TÊTE AUX PIEDS

Cinq embouts différents pour le traitement de problèmes sur **plus de 20 zones**.



POUR TOUS LES CORPS

Aucune restriction d'IMC de type de peau ou de sexe.



RSI EXCEPTIONNEL

Pas de produits consommables coûteux et fiabilité prouvée sur de nombreuses années pour un RSI rapide.





EXILIS ULTRA 360


TECHNOLOGIE ULTRA 360°

Une association unique de radiofréquence monopolaire et d'ultrasons avec la toute nouvelle technologie à 360° pour un traitement plus court et des résultats encore plus probants.



RÉSULTATS RAPIDES & DURABLES


Une durée de traitement courte avec des résultats visibles rapidement pour le traitement de problèmes sur différentes zones du corps reposant sur des données cliniques sérieuses.

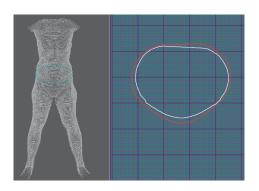

Système laser Prevas – mesure et compare les dimensions et les changements.

CONTRÔLE MAXIMUM PENDANT LE TRAITEMENT

Grâce à la technologie intégrée EFC et à l'Impedance Intelligence, le risque de surchauffe est minimisé.

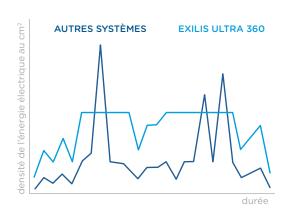



CE QU'EN DISENT VOS COLLÈGUES



Jason Lupton, M.D.
San Diego Dermatology & Laser Surgery
San Diego, CA

« Environ 75 % de mes patients qui ont suivi un traitement avec Exilis Ultra 360 finissent par se faire traiter au moins une autre zone car ils sont sont enchantés par les résultats du traitement en si peu de temps. »



Suneel Chilukuri, M.D. Refresh Dermatology Houston, TX

« Pour moi, avec Exilis Ultra, il n'y a pas de limites. La seule limite est votre imagination. Ainsi, je peux traiter n'importe quelle zone du corps aussi bien chez la femme que chez l'homme. »



Grace Liu, M.D.Newport Beach Dermatology
Newport Beach, CA

« Les patients attendent leur prochaine séance avec impatience, car ils voient que les résultats arrivent très vite. Il n'existe pas beaucoup d'appareils sur le marché de l'esthétique que les gens aiment et veulent avoir. Celui-ci en fait partie. »



M. Christine Lee, M.D., M.P.H.
The Skin and Laser Treatment Institute
Walnut Creek, CA

« L'Ultra Femme est une méthode non invasive rapide et facile à appliquer, sans interruption, qui permet un traitement sûr et efficace des zones problématiques du corps de la femme. »







715-77EXU2FR100 Exilis_Ultra_360_CAT_2.0_FR100